

# CARDIONICS® T-GLIDE

## Smörjning av Cardionics® löpband

T-GLIDE skall läggas i 4 doser mellan mattan och glidplattan enligt beskrivning och bild nedan.

Tryck ut dos 1 ca 8 cm från mattans ena kant  
Tryck ut dos 2 ca 8 cm från mattans andra kant  
Tryck ut dos 3 och 4 under mattans mitt  
1 dos= 1 msk, 15 ml T-GLIDE



Universalfett med goda smörjegenskaper. Droppar eller rinner inte vid värme. Suverän elasticitet, vibrationer absorberas och den smorda ytan får låg friktion. Skapad för driftsäkerhet vid tuff användning av kullager och glidytor. NSF-H1 klassificerat.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Undvik utsläpp i miljön. Innehåll och tub lämnas till återvinningsstation. Tillverkad i Australien.

Innehåll: Omega 58, N-metyl-N-(1-OXO-9-OKTADECENYL)-(Z)-GLYCIN, 2-(8-HEPTADECENYL)-4,5-DIHYDRO-1H-IMIDAZOL-1-ETANOL



cardionics.se

# CARDIONICS®

# T-GLIDE



200 gram